

## PANNELLO SCREENING

SCREENING

12/09/2018

Screening 15/09/2018



NOMINATIVI

TABLET

Selez. Categoria

Allineamento Binoculare

N°	Test
1	Cheratometria
2	Occhiali
3	Lenti a contatto
4	Autorefrattometria
5	Refrazione
6	Retinoscopia
7	Acutezza visiva lontano
8	Acutezza visiva vicino
9	Acutezza visiva dinamica
10	Sensibilità al contrasto CSV1000
11	Sensibilità al contrasto FACT
12	Sensibilità al contrasto Pelli Robson
13	Sensibilità al contrasto Hamilton Veale
14	Sensibilità al contrasto Ottotipi a basso contrasto
15	Recupero all'abbagliamento
16	Cover Test
17	Lungi di Worth

Test assegnati al Tablet

N°	Nome
1	Cheratometria
2	Occhiali
3	Lenti a contatto
4	Autorefrattometria
5	Refrazione

Tablet registrato da Configurare

Tablet1



## PANNELLO SCREENING

SCREENING

12/09/2018

Screening 15/09/2018



NOMINATIVI | TABLET

## Nominativo

Paziente	Nascita		
ARDITO VANESSA	28/10/1997	F	➔
BARALE PAOLA	28/10/1977	F	➔
BRUTALE FORZA	28/03/1978	F	➔
BUTTI CHIARA	28/10/2016	F	➔
CHIATTI LAURA	28/10/2016	F	➔
COLOMBO MARCO	28/03/1975	M	➔
COLOMBO PAOLO	18/09/1985	M	➔
FRATTAZZI FRANCO	13/03/1990	M	➔
LEONI ANNAPAOLA	19/08/1980	F	➔
LURAGHI PAOLO	19/12/1981	M	➔
PALLINO PINCO	28/10/2016	M	➔
PELLEGRINI FEDERICA	18/10/1995	F	➔
PROVA PROVA	28/10/2016	M	➔
SALVATERRA DANIELE	28/03/1975	M	➔

## Tablet

Tablet1 X

Paziente	Tablet
ARDITO VANESSA	Tablet1
BRUTALE FORZA	Tablet1
BUTTI CHIARA	Tablet1
COLOMBO MARCO	Tablet1
COLOMBO PAOLO	Tablet1
PALLINO PINCO	Tablet1
BARALE PAOLA	Tablet1

## Dettagli screening

Persone registrate	7
Persone esaminate	0
Esami da completare	7
Maschi	3
Femmine	4

Report Completo

La creazione delle sessioni per i tablet permette l'avvio immediato dello screening, ossia i tablet riceveranno la lista dei pazienti inseriti e potranno iniziare la sessione di test. L'operazione è irreversibile, potrà essere annullata solo bloccando l'operatività dei tablet.